

MOMICIDE

R.S INVIMA. 2013DM-0002218-R1



2. USOS DEL PRODUCTO.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

5. PRECAUCIONES

1. DESCRIPCIÓN

Líquido traslucido, libre de partículas extrañas de olor característico, pH ácido. Contiene Glutaraldehído 2%. Recomendado para uso por odontólogos. Presentación comercial: Gotero PEBD por 7mL y Frasco PEAD por 20 mL.

Solución usada como momificante pulpar, antiséptico y desinfectante en dientes temporales vitales y en dientes permanentes jóvenes con ápices inmaduros, destruye microorganismos, bacterias, hongos y virus.

Fija el tejido pulpar una vez realizada la pulpectomía.

El producto se conserva estable por tres años, almacenar bien tapado, en sitio fresco y alejado de la luz.

- Realice un Aislamiento previo, use material totalmente ESTERIL para evitar infecciones.
- Preferentemente haga una remoción de caries, esto para evitar la contaminación con bacterias de la pulpa residual.
- Elimine el tejido afectado.
- Lave y seque.
- Coloque una torunda impregnada con MOMICIDE por un lapso de 3 a 5 minutos.
- Colocar por ultimo un material que brinde protección y la restauración definitiva.

Antes de manipular el producto lea las instrucciones de uso en la etiqueta y la hoja de seguridad.

Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.

Utilizar guantes apropiados.

No utilizar MOMICIDE en forma de aerosol (con atomizador)

NO hacer diluciones.

NO ingerir el producto

Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos, proceder a la eliminación de residuos según normatividad vigente.

Lavar manos y guantes después de usar MOMICIDE.

Cerrar herméticamente el recipiente.

Mantener en sitio fresco, fuera del alcance de los niños

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Nelcy Yadira Reyes	Nombre: Sergio Hoyos H.	Nombre: Ana Paulina Páez.
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Coordinador Control Calidad	Dir. Técnico, de C. y A. C.	Gerente General
Agosto de 2018	Agosto de 2018	Agosto de 2018