



# QUATMAX ACTIVE

CERTIFICACIÓN INVIMA 2018014663

## 1. DESCRIPCIÓN

Líquido desinfectante de áreas y superficies a base de amonio cuaternario de quinta generación, proteasa y detergente biodegradable. Diseñado para una profunda desinfección y desodorización. Posee acción virucida, bactericida, germicida, fungicida. Presentación comercial: 120 mL, 250 mL, 500 mL y galón.

## 2. USOS DEL PRODUCTO

Desinfección profunda y rápida en áreas de alto tráfico de pacientes o usuarios.

Desinfectante de superficies intermedias, unidades odontológicas, bandejas, escupideras, paredes, pisos, sanitarios, camillas, incubadoras, mesas de procedimientos, equipos médicos, dispositivos termosensibles, contenedores de basura, barandas, mesones entre otros.

## 3. ESTABILIDAD

Para asegurar la estabilidad del producto:

- No adicione agua.
- No mezcle con otros productos.
- No reenvase.

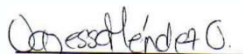
## 4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Aplique sobre las superficies a desinfectar
- Deje actuar entre uno y tres minutos
- Utilice un paño limpio y seco (de preferencia no tejido)
- Limpie en una sola dirección.

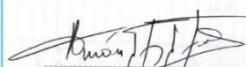
#Prodont  
TeCuida >>>

Prodont Scientific S.A.S.  
Calle 161A N° 16A-74  
Teléfono No. : +571 678 1090  
www.prodont.com

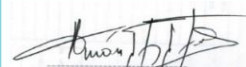
ELABORÓ

  
Vanessa Méndez O.  
Coord. C. Calidad  
Prodont Scientific S.A.S

REVISÓ

  
Sergio Hoyos H.  
Dir. Técnico, Control y  
Aseguramiento de Calidad.  
Prodont Scientific SAS.

APROBÓ

  
Sergio Hoyos H.  
Dir. Técnico, Control y  
Aseguramiento de Calidad.  
Prodont Scientific SAS.



## QUATMAX ACTIVE

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020250

### 5. PRECAUCIONES

- Mantener bien tapado a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No debe mezclarse con otros productos de limpieza y desinfección.
- Antes de usar el producto, inactive y limpie cuidadosamente derrames de líquidos corporales
- QuatMax Active no está indicado para desinfección de alto nivel de instrumental crítico.
- QuatMax Active no está indicado como antiséptico.
- No aplique directamente sobre las partes eléctricas de los equipos, teclados ni monitores; aplique primero sobre un paño y luego limpie el equipo.
- Evite el contacto con piel y mucosas.
- Antes de usar, verificar que las superficies a tratar sean compatibles con productos que contienen alcohol.

#Prodont  
TeCuida >>>

Prodont Scientific S.A.S.  
Calle 161A N° 16A-74  
Teléfono No. : +571 678 1090  
www.prodont.com

ELABORÓ

Vanessa Méndez O.  
Coord. C. Calidad  
Prodont Scientific S.A.S

REVISÓ

Sergio Hoyos H.  
Dir. Técnico, Control y  
Aseguramiento de Calidad.  
Prodont Scientific SAS.

APROBÓ

Sergio Hoyos H.  
Dir. Técnico, Control y  
Aseguramiento de Calidad.  
Prodont Scientific SAS.