



Q-SOAP ENZIMÁTICO

CERTIFICACIÓN INVIMA 2012014561

1. DESCRIPCIÓN

Es un detergente líquido de color verde translúcido libre de partículas extrañas a base de enzimas. pH neutro. Baja espuma. No corrosivo. Soluble en agua. Biodegradable y libre de fosfatos. Rápida remoción de desechos proteicos, compatible con instrumental, de uso manual y mecánico. Útil para eliminar eficazmente el material orgánico en instrumentación quirúrgica, por la acción de las enzimas que lo componen.

Contiene :

1. **Proteasa:** Rompe los enlaces peptídicos de las proteínas.
2. **Amilasa:** Elimina las manchas que contienen almidón.
3. **Lipasa:** Descompone grasas en sustancias hidrofílicas, que son más fáciles de eliminar que las manchas similares no hidrolizadas.

Presentaciones: Envases PEAD 120 mL, 500 mL, 1,000 mL, Galón.

% Detergente en el Producto: 5.08%

% En el producto diluido: 0.035 %

Factor de Dilución: 1:143.

2. USOS DEL PRODUCTO

Limpieza de instrumental quirúrgico y endoscópico en consultorios odontológicos médicos, en clínicas y laboratorios microbiológicos.

Limpieza de áreas y superficies


3. ESTABILIDAD

El producto es estable por tres años almacenado bien tapado, en sitio fresco y protegido de la luz

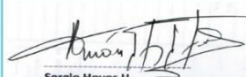
4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Diluir aproximadamente 7 mL de Q-SOAP ENZIMÁTICO en un litro de agua fría. Se recomienda para un mejor efecto usar Agua desionizada Prodont.
- Agitar hasta dilución total.
- Sumergir el instrumental a limpiar.
- Dejar por un periodo de 5 a 10 minutos.
- Enjuagar con abundante agua.
- Para limpieza de áreas y superficies, aplique la cantidad según necesidad, deje actuar unos minutos y limpie con un paño limpio y seco (preferiblemente no tejido) en una sola dirección. Enjuague con abundante agua

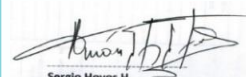
ELABORÓ


Vanessa Méndez O.
Coord. C. Calidad
Prodont Scientific S.A.S

REVISÓ


Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

APROBÓ


Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A N° 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

#Prodont
TeCuida >>>



Q-SOAP ENZIMÁTICO

CERTIFICACIÓN INVIMA 2012014561

5. PRECAUCIONES

- Antes de manipular el producto leer las instrucciones de uso en la etiqueta y en la ficha técnica.
- Se recomienda utilizar guantes para la manipulación del producto
- En caso de ingestión consultar al médico.
- En caso de contacto con mucosas lavar la zona con abundante agua.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Mantener el recipiente bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

#Prodont
TeCuida >>>

Prodont Scientific S.A.S.
Calle 161A N° 16A-74
Teléfono No. : +571 678 1090
www.prodont.com

ELABORÓ

Vanessa Méndez O.
Coord. C. Calidad
Prodont Scientific S.A.S

REVISÓ

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.

APROBÓ

Sergio Hoyos H.
Dir. Técnico, Control y
Aseguramiento de Calidad.
Prodont Scientific SAS.