



QUATMAX ACTIVE

CERTIFICACIÓN INVIMA 2018014663

1. DESCRIPCIÓN

- **Componentes:** Amonio cuaternario de quinta generación, Alcohol, proteasa y detergente biodegradable.
- Posee acción viricida, bactericida, germicida, fungicida.
- **Presentación comercial:**
Envases plástico 60 mL, 120 mL, 500 mL y GALÓN.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Desinfección profunda y rápida en áreas de alto tráfico de pacientes o usuarios.
- Desinfectante y desodorizante de superficies intermedias.

3. ESTABILIDAD

- Para asegurar la estabilidad del producto:
No adicionar agua.
- No mezclar con otros productos.
- No reenvasar.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Aplicar sobre las superficies a desinfectar
- Dejar actuar entre 1 y 3 minutos.
Utilizar un paño limpio y seco (preferencia no tejido) .
- Limpiar en una sola dirección.
- No diluir.

5. PRECAUCIONES

- Mantener bien tapado a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No mezclar con otros productos de limpieza y desinfección.
- Antes de usar el producto, inactivar y limpiar cuidadosamente derrames de líquidos corporales.
- QuatMax Active **NO** está indicado para desinfección de alto nivel de instrumental crítico.
- QuatMax Active **NO** está indicado como antiséptico.
- No aplicar directamente sobre las partes eléctricas de los equipos, teclados ni monitores.
- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- Antes de usar, verificar que las superficies a tratar sean compatibles con productos que contienen alcohol.



QUATMAX ACTIVE

CERTIFICACIÓN INVIMA 2018014663

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/4526/1/56T00576%20UDCTFC.pdf>
- http://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2018/11/LIVRO-2_miolo6_diagrama%C3%A7%C3%A3o-final.pdf#page=103
- <https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2020/04/Guia-para-la-limpieza-y-desinfeccion-de-servicios-de-salud-ante-el-Covid-19.pdf>
- <http://dspace.otalca.cl/bitstream/1950/12159/2/2019B000001.pdf>