



EUGENOL

1. DESCRIPCIÓN

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2022DM-0001220-R2

- **Componentes:** Eugenol
- Producto de uso Odontológico: líquido cementante, incoloro a amarillo pálido, con olor a clavo y sabor picante.

Presentación comercial:

Envase PEBD de 7mL, 15 mL con gotero.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Indicado para preparar pastas con Óxido de Zinc, como eugenolato y C-GROSS.
- Solución antiséptica, analgésica y anestésica

3. ESTABILIDAD

- Almacenar bien tapado, en lugar fresco y protegido de la luz.
- Vida útil: 3 años

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Adicionar eugenol al óxido de zinc o al c-gross hasta obtener una consistencia de acuerdo al procedimiento a realizar.

5. PRECAUCIONES

- Utilizar elementos de protección adecuada.
- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto consultar al médico y presentar esta ficha técnica.
- Eliminar residuos según normativa vigente.
- El EUGENOL es un producto fácilmente biodegradable.
- Mantener bien sellado los recipientes.
- Utilizar guantes apropiados.
- Mantener lejos del alcance de los niños.



EUGENOL

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2022DM-0001220-R2

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072002000200005
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2008/ora0828d.pdf>
- https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_35.htm