



ALVEODONT PWR

1. DESCRIPCIÓN

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2018DM-0017989

- **Componentes:** eugenol, benzocaína, penghawar djambi y Excipientes.
- Producto de uso odontológico: apósito de consistencia fibrosa, color café claro y olor característico, libre de aglomerados y partículas extrañas.

Presentación comercial:

Pote con cantidad 10 g

2. USOS DEL PRODUCTO

- Indicado para prevenir la alveolitis y favorecer la cicatrización. Ejerce una acción analgésica en corto tiempo. Provee un alto grado de desinfección y hemostasis.
- Proporcionar un efecto calmante sobre los tejidos alveolares, contribuyendo así a aliviar rápidamente el dolor.

3. ESTABILIDAD

- Almacenar bien tapado, en sitio fresco y protegido de la luz.
- Vida útil: 3 años

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Irrigar suavemente, con solución salina o antiséptica el alvéolo para eliminar cuerpos extraños, fragmentos óseos, restos dentales o materiales de obturación.
- Preparar una bolita que se coloca en el fondo del alveolo.
- El exceso de producto se elimina por sí solo.
- No tratar más de 5 dientes en una sesión.
- Nota: De ser necesario aplicar anestésico.

5. PRECAUCIONES

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y en la ficha de datos de seguridad.
- No utilizar en pacientes menores de 12 años.
- No usar en mujeres embarazadas y lactantes.



ALVEODONT PWR

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2018DM-0017989

- No usar en pacientes que tengan historia de reacciones a la benzocaína.
- Advertir al paciente de no hacer enjuagues enérgicos durante las 24 horas siguientes a la exodoncia.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante agua, consultar al médico y presentar esta ficha técnica.
- Utilizar guantes apropiados.
- Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos. Recoger en seco y depositar en recipientes adecuados para su posterior eliminación de acuerdo a la normativa vigente.
- Mantener los recipientes bien cerrados lejos del alcance de los niños..

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- <http://www.revmediciego.sld.cu/index.php/mediciego/article/view/1404/3043>
- <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/533/TESIS%20FINAL.pdf>
- <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/7303/1/PIUAODONT038-2017.pdf>