



BACTIXIDE PLUS

1. DESCRIPCIÓN

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-004284-R2

Componentes: Contiene Glutaraldehído 2 %.

- Producto para la desinfección y esterilización en frío.
- Anticorrosivo .
- Líquido incoloro, libre de partículas extrañas con olor a limón, pH ácido de 4. 5– 5.5.
- Incluye polvo alcalinizante que al adicionar cambia pH a alcalino de 7-5–8.5

Presentación comercial:

Envases plástico 500 mL, 1000 mL y Galón mL

2. USOS DEL PRODUCTO

- Desinfectante ,bactericida, fungicida, esporicida, esterilizante en frío de acción rápida; para instrumental médico, quirúrgico y odontológico.
- Efectivo en presencia de materia orgánica como proteínas, sangre, saliva, moco, etc.

3. ESTABILIDAD

Para asegurar la estabilidad del producto: una vez activado se mantendrá por 30 días.

- No adicionar agua.
- No mezclar con otros productos.
- Almacenar en lugar fresco y alejado de la luz
- Vida útil : 3 años

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Adicionar a la solución de BACTIXIDE PLUS el polvo activador y agitar el recipiente por 30 segundos.
- Seleccionar recipiente plástico o de acero inoxidable, limpio y con tapa, colocar suficiente BACTIXIDE PLUS activado.
- Previamente, lavar muy bien el instrumental o material a desinfectar y/o esterilizar.
- Sumergir totalmente el material a desinfectar y/o esterilizar por un periodo de 10 minutos.
- Para alto nivel de esterilización dejar por 6 horas a temperatura ambiente.
- Retirar el material de la solución y enjuagar con agua destilada o recién hervida.
- La solución empleada es de un solo **USO**.



BACTIXIDE PLUS

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-004284-R2

5. PRECAUCIONES

- No utilizar BACTIXIDE PLUS en forma de aerosol, ni hacer diluciones.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, consultar al médico.
- Cerrar herméticamente el recipiente.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Lavar manos y guantes después de usar BACTIXIDE.

6. BIBLIOGRAFIA

- <https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2020/04/Guia-para-la-limpieza-ydesinfeccion-de-servicios-de-salud-ante-el-Covid-19.pdf>
- <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3898/ahr1de1.pdf;jsessionid=78721C0163A087>