



HEMOSTATGEL+

1. DESCRIPCIÓN

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0017988

- **Componentes:** Cloruro de Aluminio 25%.
- Producto de Uso odontológico: Gel viscoso, acuoso e incoloro, libre de partículas extrañas, de olor característico.

Presentación comercial:

Jeringa polipropileno por 2g y de 5g.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Permite realizar una retracción gingival inmediata y temporal para la toma de impresiones y ciertos actos quirúrgicos.
- Por su acción hemostática, detiene la hemorragia gingival por su acción sobre los capilares y la supuración de la mucosa.

3. ESTABILIDAD

- Almacenar bien cerrado, en sitio fresco, protegido de la luz.
- Vida útil: 3 años.

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

Antes de realizar la toma de impresión, es indispensable preparar la encía. Para obtener modelos precisos, es necesario efectuar una ligera retracción gingival.

- Impregnar con HEMOSTATGEL+, el hilo retractor.
- Introducirlo en el surco gingival, lo que induce a la vasoconstricción de los capilares de la encía.
- Después de la toma de impresión, hacer un enjuague con agua.

No contiene epinefrina, por ello no hay peligro de usarlo en pacientes con problemas cardiovasculares.

5. PRECAUCIONES

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de ocurrir, lavar con abundante agua. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.



HEMOSTATGEL+

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018DM-0017988

- No hacer diluciones.
- Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos, eliminar según la normatividad vigente.
- Cerrar herméticamente el recipiente.
- Utilizar guantes apropiados.
- Mantener en sitio fresco, protegido de la luz, lejos del alcance de los niños.

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- <http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v25n4/a10v25n4.pdf>
- <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/133353/1/078877.pdf>