



NAPIDFLUOR

1. DESCRIPCIÓN

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2018DM-0003388-R1

- **Componentes:** Fluoruro de sodio al 2%.
- Producto de uso Odontológico: Gel traslúcido libre de aglomerados y partículas extrañas, de pH ácido, con sabor a fresa de color rojo o sabor a chicle de color rosado.

Presentación comercial:

Envases PVC de 120 mL, 240 mL, PEAD 500 mL y GAL.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Tratamiento tópico, profiláctico para la prevención de la caries dental.
- Remineraliza el esmalte y fortalece los dientes.

3. ESTABILIDAD

- No sufre alteraciones almacenado en sitio fresco y bien tapado.
- Vida útil: 3 años

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Después de hacer profilaxis.
- Colocar la cantidad necesaria de NAPIDFLUOR en una cubeta adecuada.
- Aplicar cuidadosamente el gel en el área a tratar.
- Dejar actuar NAPIDFLUOR por espacio de 60 segundos.
- Retirar la cubeta y verificar que no quede residuos de gel.

5. PRECAUCIONES

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- No ingerir alimento hasta después de 1 hora de aplicado el gel.
- Evitar el contacto con ojos y piel; en dado caso lavar con abundante agua.
- En caso de ingestión consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.
- Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos. Proceder a la eliminación de residuos según normativa vigente.



NAPIDFLUOR

REGISTRO SANITARIO INVIMA. 2018DM-0003388-R1

- Los envases contaminados de esta sustancia tendrán el mismo tratamiento que el producto contenido.
- Utilizar guantes apropiados.
- Mantener bien cerrado el recipiente, lejos del alcance de los niños

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- http://repository.ces.edu.co/bitstream/10946/459/1/Fluor_Terapia_Caries_Dental.pdf
- <https://scielosp.org/article/rpsp/2002.v11n1/59-66/es/>