



Q-SOAP ENZIMÁTICO

1. DESCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN INVIMA 2012014561

- **Componentes:** detergente biodegradable con enzimas (Lipasa, amilasa y proteasa) y pH neutro.
- Detergente líquido multienzimático.

Presentación comercial:

Envases plástico 120 mL, 500 mL, 1000 mL, Galón Y 20 L.

2. USOS DEL PRODUCTO

- Limpieza de instrumental quirúrgico, odontológico, médico, hospitales y laboratorio.
- Limpiezas en áreas y superficies.

3. ESTABILIDAD

Para asegurar la estabilidad del producto:

- No mezclar con otros productos de limpieza.
- Almacenar en lugar fresco y protegido de la luz.
- No adicionar agua al envase original.
- Vida útil : 3 años

4. INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Diluir aproximadamente 5 mL de Q-SOAP ENZIMÁTICO en 1 litro de agua.
- Agitar hasta disolución total.
- Sumergir el instrumental a limpiar.
- Dejar por un periodo de 5 a 10 minutos.
- Frotar con cepillo suave, de ser necesario.
- Enjuagar con abundante agua.

5. PRECAUCIONES

- Antes de usar el producto ver las instrucciones.
- Rotular los recipientes adecuadamente.
- Utilizar guantes para manipular el producto.

Q-SOAP ENZIMÁTICO



CERTIFICACIÓN INVIMA 2012014561

- No mezclar con otros productos de limpieza o desinfección. En caso de contacto con ojos y/o mucosas lavar la zona con abundante agua.
- En caso de ingestión consultar al médico.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Cerrar herméticamente el recipiente.

6. ESTUDIOS Y REFERENCIAS

- http://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2018/11/LIVRO2_miolo6_diagrama%C3%A7%C3%A3o-final.pdf#page=103X C