


FICHA TÉCNICA

BAQTIPRO

REGISTRO SANITARIO
INVIMA N° 2019DM-0020250

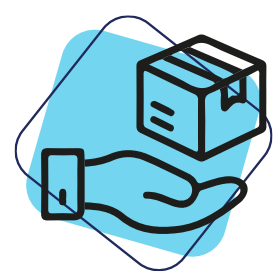

Aspecto físico:

Líquido verde translúcido, libre de partículas extrañas olor a limón.



Ingrediente activo:

Contiene Glutaraldehído al 2% , Amonio Cuaternario de quinta generación, y tensoactivo biodegradable.



Beneficios:

Vida útil:

3 años de vida útil en condiciones optimas.

Perfil del Usuario

Profesional de la salud,
(técnicos , auxiliares), personal
de servicios generales.



Potente Sinergia : la combinación de amonio cuaternario de quinta generación y glutaraldehído al 2% potencia la acción germicida, viricida y fungicida.

Bioseguridad garantizada: ideal para entornos clínicos que requieren máxima higiene y control de infecciones.

Desodorización: además de desinfectar , ayuda a eliminar malos olores.

Acción rápida :requiere tiempos de contacto cortos para una desinfección efectiva (de 5 a 10 min)

Amplio espectro antimicrobiano : eficaz contra bacterias gram positivas y negativas , hongos , virus y esporas .

Poder residual: la presencia de amonio cuaternario de quinta generación permite su permanencia activa sobre superficies por más tiempo , prolongando su efecto desinfectante .

Baja corrosividad: seguro para la mayoría de las superficies industriales y médicas.

Eficaz en presencia de materia orgánica: Mantiene su acción incluso en condiciones difíciles

Usos del producto:

En el Sector Salud

Desinfección de alto nivel de instrumental médico y odontológico: Ideal para equipos no térmicos como endoscopios, sondas y otros dispositivos delicados.

Control de infecciones nosocomiales: ayuda a la prevención de bacterias resistentes como Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa.

Usos en Laboratorios

Descontaminación de superficies de trabajo: Campanas de flujo laminar, mesones, vitrinas y equipos.

V6-0625

FICHA TÉCNICA

BAQTIPRO

REGISTRO SANITARIO

INVIMA N° 2019DM-0020250

Instrucciones de uso:

- **Métodos:** Puede aplicarse por inmersión, o con paño húmedo.

No aplicar directamente sobre las partes eléctricas y electrónicas de los equipos, distribuir con paño limpio y seco (microfibra). Aplicar directamente sobre las superficies en las áreas a desinfectar. Esparcir con un paño de microfibra por toda el área


- **Superficies equipos:** Asegúrate de que estén limpias y libres de residuos orgánicos antes de aplicar el desinfectante.

Tiempo de contacto:

- **Desinfección:** Dejar actuar de 5 a 10 minutos, luego enjuagar si la superficie estará en contacto con alimentos o piel. (tener en cuenta protocolos internos)

Precauciones

- No mezclar con otros productos químicos.
- Usar guantes y protección ocular durante la manipulación.
- Evitar inhalación directa y contacto prolongado con la piel.
- Almacenamiento: Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y sin exposición directa al sol.
- Lavar guantes y manos después de usar el producto.
- No usar en superficies ambientales.

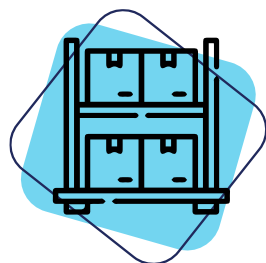

Almacenamiento:


Almacenar a temperaturas inferior 30 °C, manteniéndose en un sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.



Estabilidad:

Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas de temperatura, humedad y sellado.

Presentaciones		
Envase PEAD 500 mL	Envase PEAD 1000 mL	Envase PEAD 3785 mL y 20L

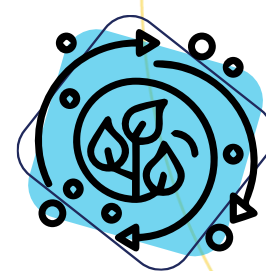

Ambiental:

Envases: Reciclaje PEAD (#2) tras triple lavado

Información adicional


El Glutaraldehído al 2%:

- Es un biocida de alto nivel con propiedades bactericidas, fungicidas, virucidas, esporicidas y tuberculicidas.
- Actúa por alquilación de grupos funcionales en proteínas y ácidos nucleicos, inactivando microorganismos

FICHA TÉCNICA

BAQTIPRO

REGISTRO SANITARIO
INVIMA N° 2019DM-0020250

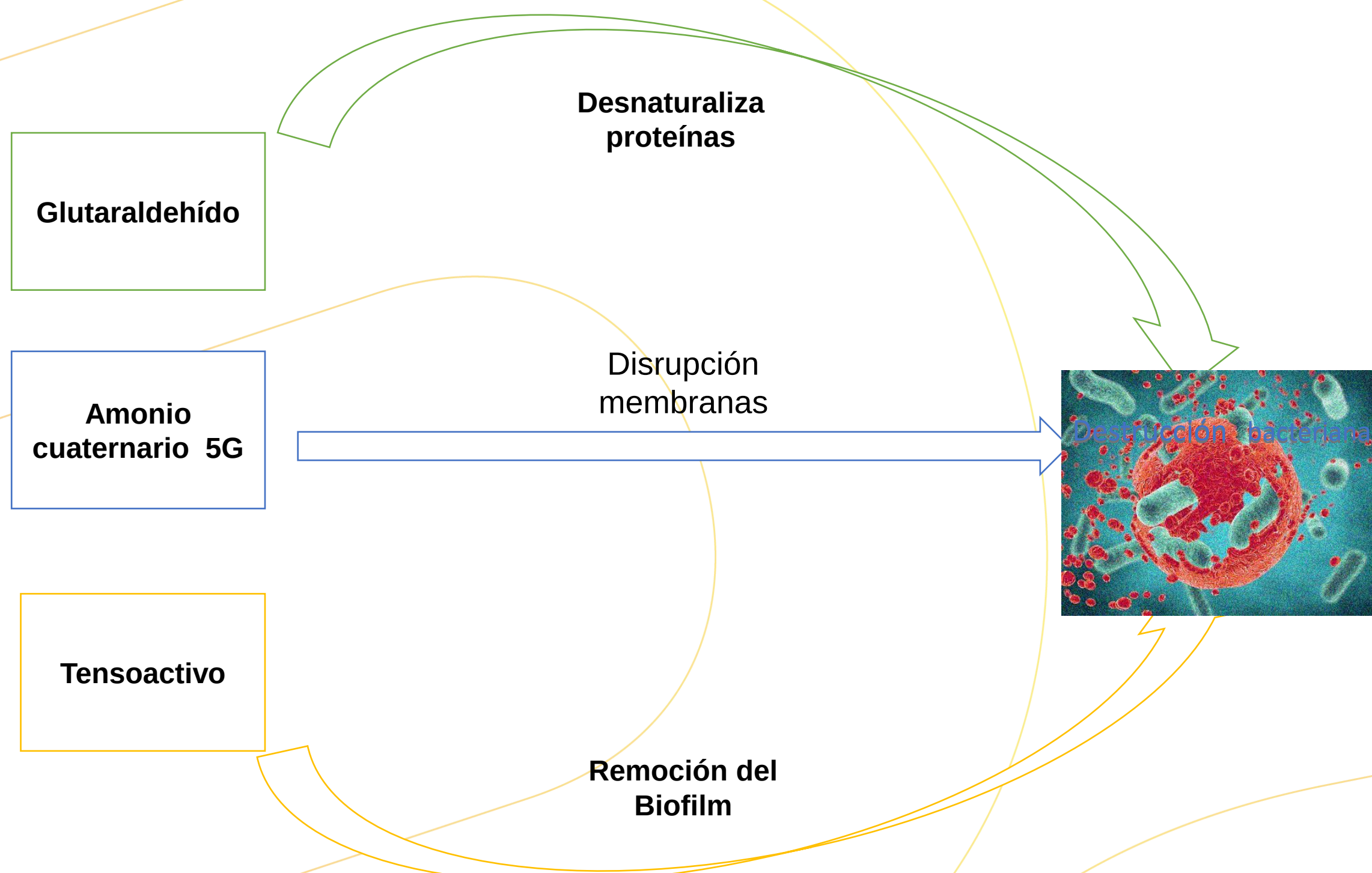

V6-0625

[1] CDC: Guideline for Disinfection and Sterilization (2023)

[2] J Hosp Infect 2024: "Synergistic effect of glutaraldehyde-quat combinations"

Documento emitido por: Prodont Scientific SAS
COPIA NO CONTROLADA



Contáctanos
Control de calidad Prodont
Control.calidad@prodont.com
(+57) 313 345 4247

Industria **100%**
Colombiana