


FICHA TÉCNICA

NAPID FLUOR

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2018DM-0003388-R1

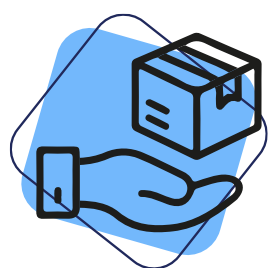

Aspecto físico:

Gel traslúcido libre de aglomerados y partículas extrañas, con pH Neutro o ácido.

Napid Fluor chicle :pH ácido color rosado pálido

Napid Flúor fresa :pH ácido color rojo


Napid Flúor neutro :pH neutro translúcido
(con propiedades tixotrópica)



Ingrediente activo:

Fluoruro de sódio al 2%.

Clasificación de riesgo

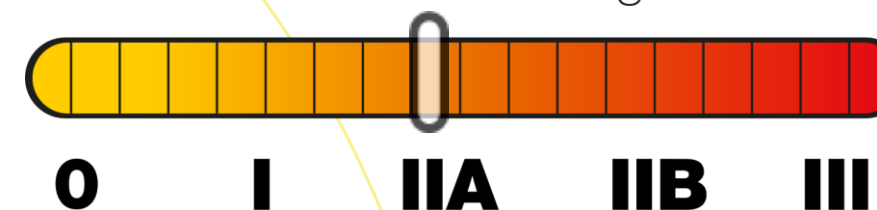

Beneficios:

Vida útil:

3 años de vida útil bajo condiciones optimas.

Napid Flúor Neutro:

Compatible con restauraciones estéticas: no altera ni daña materiales como resinas, cerámicas o coronas.

Uso seguro en ortodoncia: ideal para pacientes con brackets, ya que no corroe los componentes metálicos.

Menor riesgo de irritación: su pH cercano a 7 lo hace más suave para tejidos blandos y pacientes con sensibilidad.

Aplicación prolongada : puede mantenerse más tiempo en boca sin causar molestias, lo que favorece una absorción gradual de flúor. (Con propiedades tixotrópicas)

Napid Flúor pH ácido :

Mayor eficacia anticaries : su pH ácido (alrededor de 3.5) favorece una penetración más rápida en el esmalte y una remineralización profunda.

Acción rápida: ideal para sesiones cortas en consultorio, con efectos visibles en menos tiempo.

Reducción de la sensibilidad dental: ayuda a sellar túbulos dentinarios expuestos, disminuyendo la sensibilidad.

Prevención de caries en zonas de alto riesgo: recomendado en pacientes con historial de caries recurrentes o higiene deficiente.

Usos del producto:

Usos del Napid flúor neutro

Prevención de caries en pacientes con restauraciones estéticas: ideal para dientes con resinas compuestas, cerámicas o coronas, ya que no las deteriora.

Tratamiento en pacientes con ortodoncia: seguro para brackets y alambres, sin riesgo de corrosión.



V9-0426

Perfil del Usuario

Uso exclusivo para
profesionales odontológicos.

FICHA TÉCNICA

NAPID FLUOR

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2018DM-0003388-R1

Reducción de sensibilidad dental : ayuda a sellar túbulos dentinarios expuestos, especialmente en pacientes con desgaste cervical.

Aplicación en niños y adultos con mucosa sensible: su pH neutro lo hace menos irritante para tejidos blandos.

Usos del Napid Flúor Ácido : (Sabores)

Prevención intensiva de caries: su pH ácido favorece una rápida absorción de flúor en el esmalte, ideal para pacientes con alto riesgo cariogénico

Aplicación profesional en consultorio : se utiliza en sesiones cortas (1minuto) con cubetas o pincelado directo.

Reducción de sensibilidad postoperatoria: útil después de profilaxis, blanqueamientos o tratamientos periodontales.

Tratamiento en zonas de desmineralización: ayuda a remineralizar manchas blancas incipientes en esmalte.

No recomendado en restauraciones estéticas: puede deteriorar resinas, cerámicas y materiales compuestos

Instrucciones de uso:

Napid Fluor neutro :

Evaluación clínica

- Verificar el estado bucal del paciente y la presencia de restauraciones estéticas (resinas, cerámicas).
- Determinar si hay sensibilidad o riesgo cariogénico.

Profilaxis previa

- Realizar limpieza dental con cepillo y pasta profiláctica sin flúor (Sylkapro) para eliminar placa y facilitar la acción del gel.

Selección del gel

- Usar gel de flúor Napid Flúor neutro 2%, compatible con restauraciones.

Colocación del gel en cubetas

- Llenar cubetas superiores e inferiores con una capa uniforme de gel.

Aplicación en boca

- Colocar las cubetas en la boca del paciente.
- Pedir que muerda suavemente y mantenga la posición durante 4 minutos.

Retiro y enjuague

- Retirar las cubetas y elimina el exceso de gel con aspiración.
- No enjuagar con agua; solo escupir el exceso.

Indicaciones postratamiento

- No comer, beber ni enjuagar durante 30 minutos para permitir la absorción del flúor.

Napid Fluor ácido : (Fresa /chicle)

Evaluación clínica

- Verificar el estado bucal del paciente y la presencia de restauraciones estéticas (resinas, cerámicas).
- Determinar si hay sensibilidad o riesgo cariogénico.

Profilaxis previa

- Realizar limpieza dental con cepillo y pasta profiláctica sin flúor (Sylkapro) para eliminar placa y facilitar la acción del gel.

Selección del gel

- Usar gel de flúor Napid Flúor chicle o fresa 2%, pH ácido

Colocación del gel en cubetas

- Llenar cubetas superiores e inferiores con una capa uniforme de gel.

Aplicación en boca

- Colocar las cubetas en la boca del paciente.
- Pedir que muerda suavemente y mantenga la posición durante 1 minuto.

V9-0426

FICHA TÉCNICA

NAPID FLUOR

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2018DM-0003388-R1

Retiro y enjuague


- Retirar las cubetas y elimina el exceso con aspiración.
- No enjuagar con agua; solo escupir el exceso.

Indicaciones postratamiento

- Evitar alimentos, bebidas y enjuagues durante 30 minutos.


Precauciones

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta
- Evitar ingestión accidental . Aunque el Napid flúor neutro es menos irritante, puede causar malestar gastrointestinal si se ingiere en grandes cantidades. Supervisar especialmente en niños.
- Usar guantes y protección ocular :puede causar irritación leve.
- No aplicar sobre mucosa lesionada. aunque es suave, puede generar ardor si hay úlceras o heridas en boca.
- Controlar el tiempo de aplicación: No exceder los 4 minutos si es Napid Flúor neutro y 1 minuto si es Napid flúor ácido , recomendados para evitar saturación innecesaria.
- Evitar contaminación cruzada: usa cubetas desechables o esterilizables. No reutilices gel sobrante.
- Evitar contacto del Napid flúor pH ácido con restauraciones estéticas :puede deteriorar resinas, cerámicas y materiales compuestos. No usar en pacientes con restauraciones sensibles
- No ingerir alimento hasta después de 30 min a 1 hora de aplicado el gel.
- Evitar el contacto con ojos y piel; en este caso lavar con abundante agua
- En caso de ingestión consultar al médico
- Mantener los envases bien cerrados y mantener lejos del alcance de los niños.

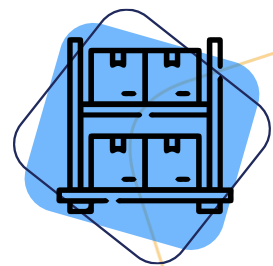


Almacenamiento:

Almacenar a temperaturas inferior 25 °C, manteniéndose en un sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.

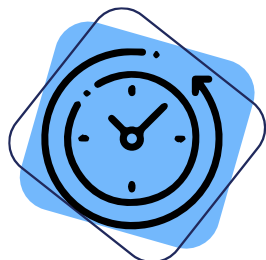

Estabilidad:

Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas de temperatura, humedad y sellado.

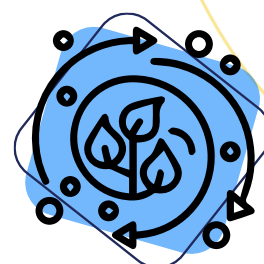

Ambiental:

No incorporar a suelos ni acuíferos. Depositar en recipientes adecuados. Clasifica el gel de flúor como “residuo peligroso químico”. Etiqueta los envases con la leyenda “Residuos Peligrosos” y especifica su contenido.

Presentaciones		
Envase cilíndrico bala 500 Y 1000 mL	Envase elico transparente 60, 120 y 240 mL	Envase natural 3785 mL

V9-0426

FICHA TÉCNICA

NAPID FLUOR

REGISTRO SANITARIO
INVIMA 2018DM-0003388-R1

Información adicional

USO CLÍNICO	FLÚOR NEUTRO	FLÚOR ÁCIDO
Restauraciones estéticas	✓ Seguro	✗ Puede dañarlas
Ortodoncia	✓ Compatible	⚠ Precaución
Prevención de caries	✓ Moderada	✓ Alta eficiencia
Sensibilidad dental	✓ Recomendado	✓ Recomendado
Aplicación domiciliaria	✓ Posible	✗ Solo profesional

- [1] "Eficacia de NaF al 2% en esmalte primario", Pediatr. Dent. 2024.
- [2] "Protocolos de aplicación tópica en ortodoncia", J. Dent. Appl. 2023.

Documento emitido por: Prodont Scientific SAS
COPIA NO CONTROLADA



Contáctanos
Control de calidad Prodont
Control.calidad@prodont.com
(+57) 313 345 4247

