

FICHA TÉCNICA

HEMOSTAT GEL+

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2018DM-0017988



Aspecto físico:

Gel viscoso, acuoso e incoloro, libre de partículas extrañas, de olor característico.




Ingrediente activo:

Cloruro de Aluminio 25%.



Clasificación de riesgo

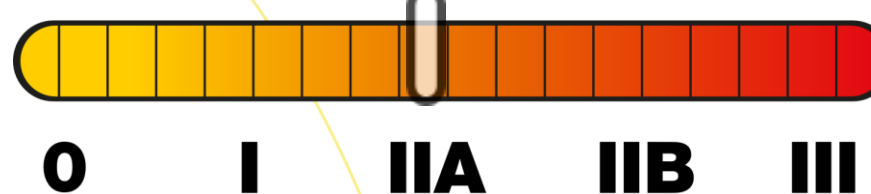

Beneficios:

Vida útil:

3 años de vida útil bajo condiciones optimas.

Hemostasia local eficaz: controla el sangrado gingival leve gracias a su acción vasoconstrictora.

Evita la formación de coágulos visibles, lo que facilita el trabajo clínico.

Retracción gingival temporal: permite separar el tejido gingival del diente, creando espacio para la toma de impresiones o colocación de restauraciones. Mejora la visibilidad y acceso al margen gingival.

Compatibilidad estética: no mancha los tejidos blandos ni duros, lo cual es esencial en la zona estética anterior.

El residuo hemostático se elimina fácilmente sin afectar la preparación dental.

Facilidad de uso: se aplica directamente en el surco gingival mediante hilo impregnado o jeringa.

Su consistencia viscosa permite una colocación controlada y localizada.

Perfil del Usuario

Uso exclusivo para
profesionales odontológicos.

Usos del producto:

Control del sangrado gingival leve: actúa como agente hemostático, deteniendo pequeñas hemorragias en encías.

Es útil en procedimientos restaurativos y protésicos donde se requiere un campo seco.

Retracción gingival temporal: separa el tejido gingival del diente, creando espacio en el surco gingival.

Facilita la toma de impresiones dentales y la colocación de restauraciones subgingivales.

Mejora en la toma de impresiones dentales: al controlar humedad y sangrado, permite obtener modelos más precisos.

Se aplica impregnando un hilo retractor o directamente en el surco gingival.

Cementación de prótesis y restauraciones: garantiza que el margen gingival esté libre de sangre y fluidos, mejorando la adhesión.



FICHA TÉCNICA

HEMOSTAT GEL+

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2018DM-0017988

Usos del producto:

Se usa en coronas, puentes y carillas.

Procedimientos quirúrgicos menores: ayuda a mantener el campo operatorio limpio y seco en pequeñas intervenciones.

Instrucciones de uso:

Reparación del área

- Asegurar que el diente y la zona gingival estén limpios.
- Retirar placa y restos de saliva para mejorar la acción del gel.

Selección del método de aplicación

- Puede aplicarse directamente con una jeringa o microbrush.
- También se puede impregnar un hilo retractor con el gel y colocarlo en el surco gingival.

Colocación del gel

- Aplicar una pequeña cantidad en el surco gingival o sobre el área con sangrado.
- Distribuir de manera uniforme para cubrir el tejido blando.

Tiempo de acción

- Dejar actuar entre 1 y 3 minutos (dependiendo del grado de sangrado y retracción requerida).
- Evitar tiempos prolongados para prevenir irritación gingival.

Retiro del gel

- Lavar la zona con abundante agua o solución salina.
- Asegurar eliminar cualquier residuo antes de continuar con la impresión o restauración.

Verificación del campo operatorio

- Comprobar que el sangrado esté controlado y que el margen gingival esté visible.
- Si es necesario, repite la aplicación de forma breve.

Continuación del procedimiento

- Una vez controlado el tejido, procede con la toma de impresión, cementación o restauración.

Precauciones

- No usar en casos de hemorragia severa (solo indicado para sangrado leve).
- Evitar contacto prolongado con la mucosa para prevenir irritación.
- Siempre enjuagar bien antes de aplicar materiales adhesivos o de impresión.
- No sustituye técnicas quirúrgicas de control de tejidos.
- No contiene epinefrina, por ello no hay peligro de usarlo en pacientes con problemas cardiovasculares.
- Utilizar elementos de protección adecuada.
- Leer las instrucciones de uso.


V7-1125

FICHA TÉCNICA

HEMOSTAT GEL+

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2018DM-0017988

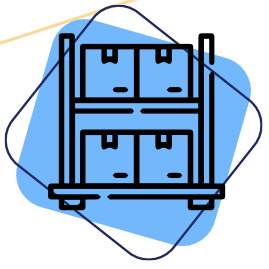


Almacenamiento:

Almacenar a temperaturas inferior 25°C, manteniéndose en un sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.



Estabilidad:

Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas de temperatura, humedad y sellado.

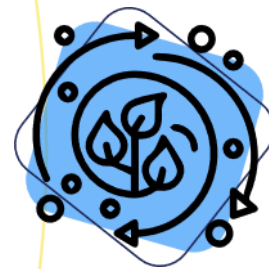

Ambiental:

No incorporar a suelos ni acuíferos. Depositar en recipientes adecuados. Triple lavado → Reciclaje PP (#5).

Presentaciones	
Jeringa PP por 2 g	Jeringa PP por 5 g

Información adicional

USO CLÍNICO	BENEFICIO PRINCIPAL	EJEMPLO DE APLICACIÓN
Hemostasia gingival	Control de sangrado	Restauraciones subgingivales
Retracción gingival	Acceso al margen	Toma de impresiones dentales
Preparación de impresiones	Modelos precisos	Coronas y puentes
Cementación de prótesis	Mejor adhesión	Carillas y coronas
Procedimientos menores	Campo limpio	Cirugías menores

- [1] Llerena Hernán (2015). Agentes hemostáticos en cirugía periapical. Revisión de literatura.
- [2] ISO 7405: Evaluación de biocompatibilidad en odontología
- [3] J Oral Maxillofac Surg 2023: "Aluminum chloride vs electrocautery in anticoagulated patients"



Contáctanos
Control @prodont.com
(de calidad Prodont
Control.calidad+57) 313 345
4247

Documento emitido por: Prodont Scientific SAS

COPIA NO CONTROLADA

