

FICHA TÉCNICA

ALVEODONT PWR

REGISTRO SANITARIO

INVIMA. 2018DM-0017989



Aspecto físico:


Apósito de consistencia fibrosa, color café claro y olor característico, libre de aglomerados y partículas extrañas.



Ingrediente activo:

Eugenol, benzocaína, penghawar djambi y Excipientes.

Clasificación de riesgo

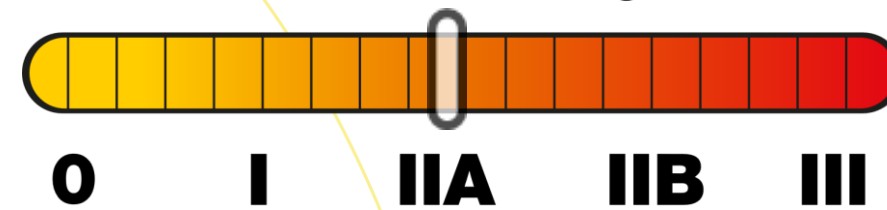

Beneficios:

Vida útil:

3 años de vida útil bajo condiciones optimas.

Perfil del Usuario

Uso exclusivo para profesionales odontológicos.

Acción analgésica inmediata: la benzocaína es un anestésico local que reduce el dolor en corto tiempo, proporcionando confort al paciente.

Propiedades antiinflamatorias y calmantes: el eugenol (derivado del clavo de olor) tiene efecto sedante sobre el tejido nervioso y ayuda a disminuir la inflamación.

Efecto desinfectante y antiséptico: el eugenol y otros componentes contribuyen a un alto grado de desinfección, reduciendo el riesgo de infección post-exodoncia.

Favorece la cicatrización :el penghawar djambi, una fibra vegetal, actúa como soporte físico dentro del alvéolo, ayudando a mantener la pasta en su lugar y estimulando la regeneración del tejido.

Prevención y tratamiento de la alveolitis: se utiliza tanto de forma preventiva como curativa, reduciendo la incidencia de alveolitis seca y mejorando la evolución clínica.

Usos del producto:

Tratamiento de la alveolitis seca (osteítis alveolar):se coloca directamente en el alvéolo para aliviar el dolor intenso y favorecer la cicatrización.

Prevención de alveolitis en pacientes de riesgo: en casos de extracciones traumáticas, pacientes fumadores o con antecedentes de alveolitis, puede usarse como medida preventiva.

Alivio sintomático inmediato: gracias a la benzocaína y el eugenol, proporciona analgesia rápida y duradera.

Acción antiséptica y antiinflamatoria local: el eugenol ayuda a controlar la proliferación bacteriana y reduce la inflamación.

Mantenimiento del coágulo y protección del alvéolo: el penghawar djambi, al ser una fibra vegetal, actúa como soporte físico que mantiene la pasta en su lugar y protege el tejido en regeneración.



FICHA TÉCNICA

ALVEODONT PWR

REGISTRO SANITARIO

INVIMA. 2018DM-0017989

Instrucciones de uso:

Confirmación del diagnóstico:

- Verificar alveolitis seca: dolor intenso 2–4 días post-extracción, alvéolo vacío o con coágulo desintegrado, halitosis, sin supuración marcada.

Historia y consentimiento:

- Revisar alergias a eugenol o benzocaína, antecedentes de methemoglobinemia, embarazo/lactancia. Explicar el procedimiento y obtener consentimiento.

Asepsia y materiales listos:

- Guantes, mascarilla, irrigador, suero fisiológico tibio, pinzas, cureta roma (opcional), gasas, la pasta fibrosa (eugenol/benzocaína/penghawar djambi), jeringa de irrigación, anestésico local si es necesario.

Desbridamiento e irrigación

Anestesia local (opcional)

Anestesia infiltrativa mínima si el dolor impide el manejo. Evita vasoconstrictor excesivo.

Irrigación suave del alvéolo:

- Con suero fisiológico tibio, eliminar restos alimentarios y detritus. Evitar curetaje agresivo—no raspar paredes óseas.

Secado controlado:

- Colocar gasas para retirar exceso de líquido sin desecar completamente el alvéolo.
- Colocación de la pasta fibrosa

Preparación de la pasta:

- Tomar una pequeña cantidad y formar una mecha/fibra o una bolita del tamaño del alvéolo. No debe ser compacta ni excesiva.

Inserción atraumática:

- Introducir la mecha fibrosa dentro del alvéolo con pinza, sin comprimir y sin suturar. Debe quedar estable, pero con espacio para drenaje natural.

Verificación de estabilidad:

- Asegurar que no sobresalga en exceso y que el paciente pueda cerrar sin molestia.

Instrucciones inmediatas al paciente:

- Evitar enjuagues vigorosos 24 h, no succionar con pajilla, no fumar, dieta blanda tibia, higiene cuidadosa sin perturbar el alvéolo.
- Mantener la pasta hasta remisión del dolor (habitualmente 3–5 días).

Precauciones

- Leer detenidamente las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de datos de seguridad.
- Debe ser aplicado únicamente por un odontólogo, nunca por el paciente en casa.
- Confirmar que el paciente no sea alérgico al eugenol (puede causar irritación o quemadura química) ni a la benzocaína (riesgo de reacciones alérgicas o methemoglobinemia).
- No sobrellenar el alvéolo; el exceso puede causar presión dolorosa o dificultar la cicatrización
- No utilizar en pacientes menores de 12 años.
- No usar en mujeres embarazadas y lactantes.
- No tratar más de 5 dientes en una sola sesión con este material.
- Advertir al paciente de no hacer enjuagues enérgicos durante las 24 horas siguientes a la exodoncia.
- Mantener los recipientes bien cerrados lejos del alcance de los niños.
- No usar mas de 0,8 g (dientes) en una sesión.
- No se necesita sutura ya que se autoelimina gradualmente con el movimiento de la lengua.

V6-1125

FICHA TÉCNICA


ALVEODONT PWR

REGISTRO SANITARIO

INVIMA. 2018DM-0017989

Precauciones

- No usar en infecciones activas con supuración. En esos casos se requiere manejo antibiótico y drenaje, no solo la pasta fibrosa.
- Evitar en pacientes de riesgo: precaución en fumadores, inmunocomprometidos o embarazadas; reforzar medidas preventivas y controles.

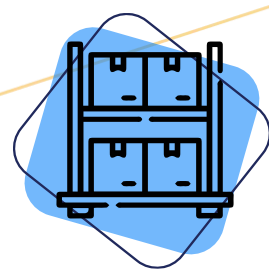


Almacenamiento:

Almacenar a temperaturas inferior 25 °C, manteniéndose en un sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.



Estabilidad:

Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas de temperatura, humedad y sellado.

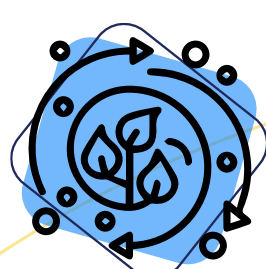

Ambiental:

No verter el producto en suelos ni cuerpos de agua. No biodegradable.

Presentaciones

Pote PP 10 G

V6-1125

Información adicional

ALVEODONT PWR presenta un mecanismo de acción combinado

- **Eugenol**: actúa sobre las terminaciones nerviosas, reduciendo la transmisión del dolor y aportando efecto antiséptico.
- **Benzocaína**: bloquea los canales de sodio en las fibras nerviosas locales, produciendo anestesia rápida.
- **Penghawar djambi**: fibra vegetal que funciona como vehículo y soporte, manteniendo la pasta en el alvéolo y favoreciendo la cicatrización.

El alivio del dolor suele ser rápido (minutos) tras la colocación

El efecto puede mantenerse 24-48 horas, tras lo cual se recomienda revisión y posible reemplazo.

[1] Cumple: ISO 13485 (Dispositivos Médicos).

[2] Hoja de seguridad Alveodont PWR. Prodont Scientific S.A.S.

[3] *Alveolitis dental propolis tincture 12% and alveogyl® in the treatment of tooth socket.* cuba: revista médica electrónica deciego de ávila.

FICHA TÉCNICA

ALVEODONT PWR

REGISTRO SANITARIO

INVIMA. 2018DM-0017989

Información adicional

Contextos clínicos donde se utiliza

<i>Situación Clínica</i>	<i>Uso de la pasta fibrosa</i>
<i>Extracción dental complicada</i>	<i>Prevención de alveolitis</i>
<i>Alveolitis seca ya instalada</i>	<i>Tratamiento y alivio del dolor</i>
<i>Pacientes con alto riesgo (fumadores, inmunocomprometidos)</i>	<i>Aplicación preventiva</i>
<i>Dolor intenso post-exodoncia</i>	<i>Analgesia local inmediata</i>

V6-1125



Documento emitido por: Prodont Scientific SAS

COPIA NO CONTROLADA

Contáctanos
Control de calidad Prodont
Control.calidad@prodont.com
(+57) 313 345 4247

