


FICHA TÉCNICA

ALVEODONT

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2023DM-0002214-R2

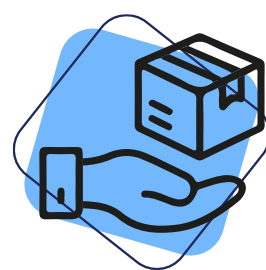

Aspecto físico:


Pasta suave, de color café claro y olor característico, libre de aglomerados y partículas extrañas.



Ingrediente activo:

Yodoformo, Eugenol, Benzocaina

Clasificación de riesgo

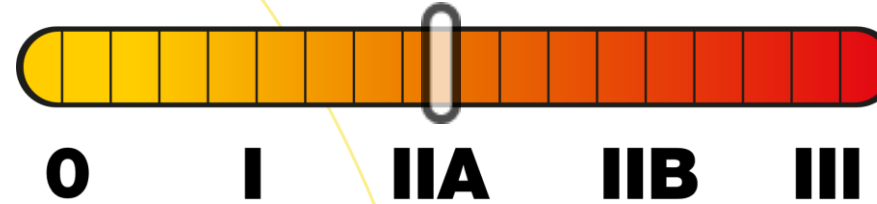

Beneficios:

Acción analgésica rápida:

la benzocaína proporciona alivio inmediato del dolor, lo que es esencial en casos de alveolitis donde el dolor suele ser intenso.

Efecto antiséptico y desinfectante:

El yodoformo ayuda a controlar la proliferación bacteriana en el alvéolo, disminuyendo el riesgo de infección.

Propiedades calmantes y cicatrizantes:

El eugenol, derivado del clavo, aporta efecto antiinflamatorio y favorece la cicatrización del tejido.

Prevención y tratamiento:

Se utiliza tanto para prevenir la alveolitis después de una extracción como para tratarla cuando ya se ha desarrollado.

Reabsorción segura:

La pasta es reabsorbible, lo que significa que no requiere retiro posterior y se integra en el proceso de cicatrización.

Vida útil:

3 años de vida útil bajo condiciones optimas.

Perfil del Usuario

Uso exclusivo para
profesionales odontológicos.

Usos del producto:

indicado para tratar la alveolitis seca (osteítis alveolar) se coloca directamente en el alvéolo para aliviar el dolor intenso y favorecer la cicatrización.

Prevención de la alveolitis

En algunos casos, el odontólogo la aplica de forma profiláctica en pacientes con alto riesgo de desarrollar esta complicación post-extracción.



V8-0426

FICHA TÉCNICA

ALVEODONT

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2023DM-0002214-R2

Control del dolor postoperatorio:

Gracias a la benzocaína, proporciona alivio inmediato en el sitio de la extracción

Acción antiséptica local:

El yodoformo ayuda a reducir la proliferación bacteriana en el alvéolo, evitando infecciones.

Estimulación de la cicatrización

El eugenol contribuye a disminuir la inflamación y favorece la reparación del tejido..

Instrucciones de uso:

Preparación del alvéolo:

- Irrigar suavemente el alvéolo con solución salina o antiséptica.
- El objetivo es eliminar cuerpos extraños, fragmentos óseos, restos dentales o materiales de obturación.

Aplicación del producto:

- Una vez limpio, introducir directamente Alveodont en el alvéolo.
- El producto es una pasta suave de color café claro, con olor característico, que contiene yodoformo, benzocaína y eugenol.

Consideraciones adicionales:

- No tratar más de 5 dientes en una sola sesión.
- En caso necesario, el odontólogo puede aplicar un anestésico local antes de colocar el producto.
- El producto ejerce acción analgésica rápida, desinfecta y favorece la cicatrización.

Precauciones

- Leer las instrucciones de uso en la etiqueta y en la ficha de datos de seguridad.
- No utilizar en pacientes menores de 12 años.
- No usar en pacientes que tengan historia a reacciones alérgicas a la benzocaína.
- No usar en mujeres embarazadas y lactantes.
- Advertir al paciente de no hacer enjuagues enérgicos durante las 24 horas siguientes a la exodoncia..
- Utilizar guantes apropiados.
- Uso exclusivo profesional: debe ser aplicado únicamente por odontólogos, ya que requiere limpieza previa del alvéolo y colocación directa del producto.
- No usar en pacientes con sensibilidad a alguno de los componentes
- Cantidad limitada: no se recomienda tratar más de 5 dientes en una sola sesión.
- Evitar contacto accidental: no debe entrar en contacto con ojos ni piel; si ocurre, lavar con abundante agua y consultar al médico.
- No ingerir: en caso de ingestión accidental, buscar atención médica inmediata
- Mantener los recipientes bien cerrados , en un lugar fresco y protegido de la luz para conservar su eficacia , lejos del alcance de los niños.


V8-0426

FICHA TÉCNICA

ALVEODONT


REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2023DM-0002214-R2

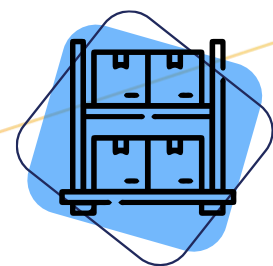


Almacenamiento:

Almacenar a temperaturas inferior 25 °C, manteniéndose en un sitio fresco, bien tapado y protegido de la luz.

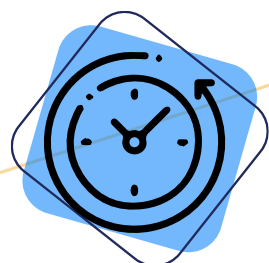

Estabilidad:

Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas de temperatura, humedad y sellado.

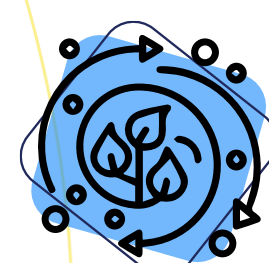

Ambiental:

No incorporar a suelos ni acuíferos. Depositar en recipientes adecuados, como residuo químico peligroso.

Presentaciones

Pote plástico convexo liner espumado 10 G

Información adicional

- Pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes (benzocaína, eugenol, yodoformo).
- No debe usarse en personas con antecedentes de reacciones alérgicas severas a anestésicos locales tipo éster.
- Evitar en pacientes con alteraciones tiroideas graves (por el contenido de yodoformo).

[1] Cumple: ISO 13485 (Dispositivos Médicos).

[2] Hoja de seguridad Alveodont. Prodont Scientific S.A.S.

[3] *Alveolitis dental propolis tincture 12% and alveogyl® in the treatment of tooth socket.* cuba: revista médica electrónica de ciego de Ávila.



Contáctanos

Control de calidad Prodont
Control.calidad@prodont.com
(+57) 313 345 4247

Documento emitido por: Prodont Scientific SAS

COPIA NO CONTROLADA

V8-0426